

# Ηλεκτρονικό Οπτότυπο Potec PLC-8000

Τηλεχειριστήριο & πρόσβαση στα Tests

Περιγραφή τμημάτων τηλεχειριστηρίου

Εικόνες,  
χειροκίνητη  
αλλαγή

Εικόνες  
αυτόματη  
αλλαγή

Επιλογή  
Contrast

Αλλαγή  
φόντου

Έναρξη / τέλος  
λειτουργίας

Τμήμα 1


Τμήμα 2

Επιλογή των test. Το μέγεθος  
αλλάζει από τα πλήκτρα και από  
τα βέλη κύλισης.



Τμήμα 3

Τμήμα 4

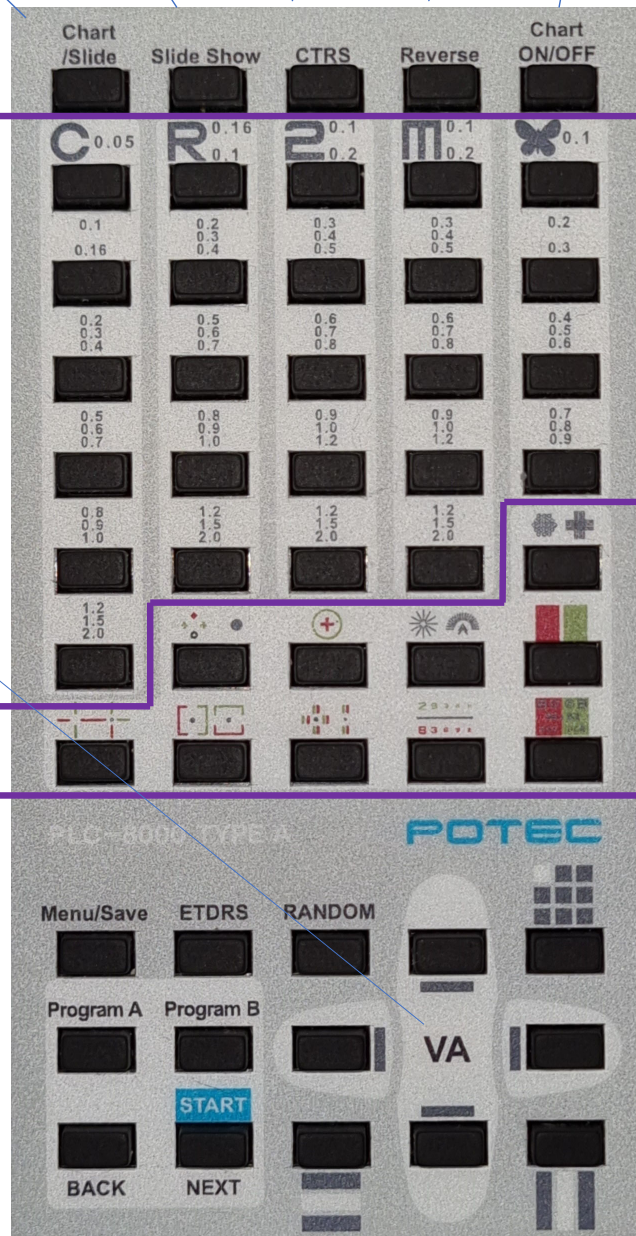

## Ηλεκτρονικό Οπτότυπο Rotec PLC-8000

Τηλεχειριστήριο & πρόσβαση στα Tests


### Τμήμα 3

Τα test μπορεί να είναι διπλά. Πιέστε δύο φορές για να αλλάξουν. Το κόκκινο/πράσινο φίλτρο μπορεί να μπει πάνω από επιλεγμένα test του τμήματος2.



Τα test με τον λευκό σταυρό μπορούν να διαμορφωθούν από τα βέλη κύλισης.

### Τμήμα 4

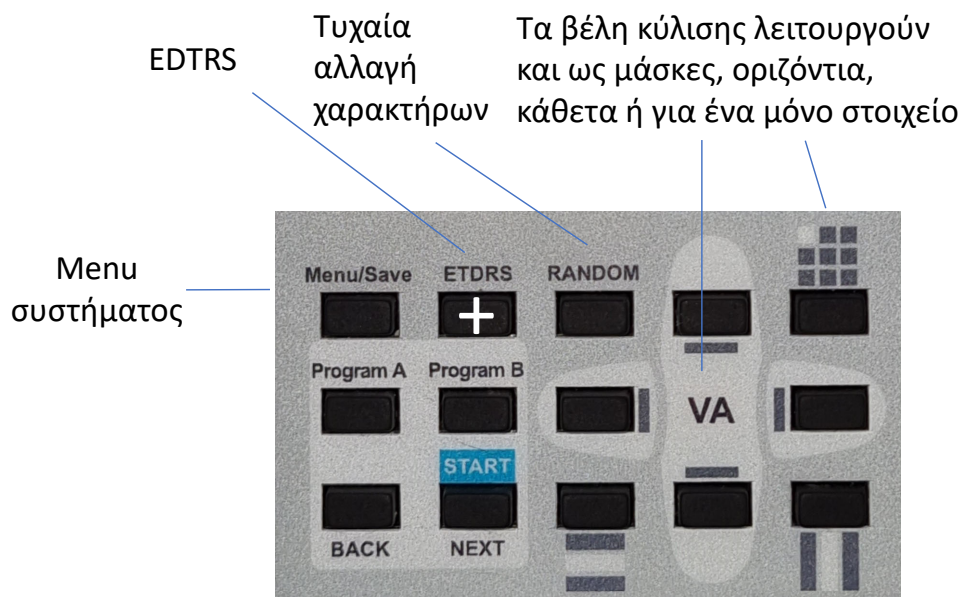

### Σημειώσεις

#### Εικόνες, χειροκίνητη αλλαγή:

Περιέχουν εικόνες ανατομίας, αμετρωπίες, τύπους φακών, 10 test Ishihara, Amsler και άλλες εικόνες που μπορούν να αντικατασταθούν με εικόνες που προτιμά ο χειριστής. Πιέστε στο Chart/Slide, επιλέξτε με τα βέλη ↑ & ↓ την ενότητα των εικόνων και στη συνέχεια με τα ← & → τις εικόνες που θέλετε.

#### Σημαντικό:

Ρυθμίστε με ακρίβεια την απόσταση εξέτασης μέσα από το menu (από 1 έως 6μ. ανά 10 εκ.) και αν απαιτείται, την χρωματική απόδοση.